

Ervaar de Ponto-soundprocessor

Een proefperiode op een softband of hoofdband



Because
sound matters



oticon
MEDICAL

Probeer voordat u beslist

Door deel te nemen aan deze proef, krijgt u de kans om een botverankerd hoorsysteem (BAHS, bone anchored hearing system) te ervaren met een softband of hoofdband. Door de Ponto-soundprocessor in verschillende dagelijkse situaties te dragen, krijgt u een idee van hoe een hoorimplantaat uw gehoor kan verbeteren. Na de implantatie merken de meeste mensen zelfs nog grotere verbeteringen in geluid.

Deze brochure bevat twee gedeelten die hieronder staan vermeld:

Dagboek (1e gedeelte)

Om u te helpen een weloverwogen keuze te maken, vragen wij u het proefdagboek in deze brochure in te vullen. We raden u aan de Ponto in alledaagse situaties te dragen, zoals:

- Thuis (gesprekken in een rustige omgeving)
- Televisiekijken
- Sociale contacten met vrienden en familie (gesprekken in een lawaaierige omgeving)
- Buitenomgeving
- Telefoongesprekken

Productgids (2e gedeelte)

In dit gedeelte vindt u verdere informatie over het gebruik van uw Ponto-soundprocessor om ervoor te zorgen dat uw proefperiode zo soepel mogelijk verloopt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Ponto-soundprocessor voor meer informatie en uitgebreide instructies.



U kunt ook de **Ponto Care**-app op uw iPhone® gebruiken om de vragen te beantwoorden.



Scan de QR-code om de app te downloaden



Situatie: **Thuis (gesprekken in een rustige omgeving)**

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto

Situatie: **Televisiekijken**

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto



Situatie: **Sociale contacten met vrienden en familie**
(gesprekken in een lawaaiige omgeving)

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto

Situatie: **Buitenomgeving**

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto



Situatie: **Telefoongesprek. Als u uw soundprocessor met uw telefoon hebt gekoppeld (zie pagina 10), gebruik dan uw telefoon om te bellen of op te nemen**

Opmerking: Dit werkt alleen voor iPhone. Voor Android™-telefoons is een ConnectClip nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorgprofessional bij uw kliniek.

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto

Geef uw eigen situatie aan (bijvoorbeeld op het werk, op school of muziek luisteren):

.....

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto



Geef uw eigen situatie aan (bijvoorbeeld op het werk, op school of muziek luisteren):

Datum/tijd:.....

Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto

Geef uw eigen situatie aan (bijvoorbeeld op het werk, op school of muziek luisteren):

Datum/tijd:.....


Ervaring met Ponto



Ervaring zonder Ponto



Overzicht van de soundprocessor

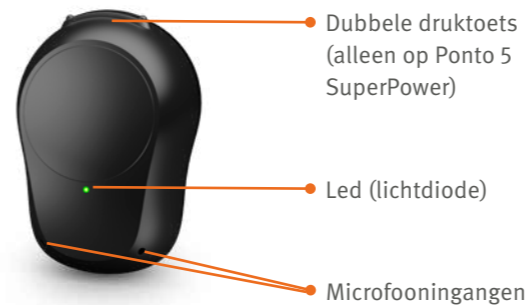

Opmerking: Het veiligheidskoordje is ontworpen om uw soundprocessor op zijn plaats te houden tijdens fysieke activiteiten en in situaties waarin deze zou kunnen vallen. U kunt het veiligheidskoordje vastmaken aan de soundprocessor en de clip aan uw kleding.

Plaatsing van de soundprocessor

Voor optimale prestaties plaatst u de soundprocessor verticaal met de microfooningangen aan de onderkant, horizontaal uitgelijnd.

Zorg dat niets de soundprocessor raakt (bijv. uw oor, huid of een muts/pet) om feedback (fluitend geluid) te voorkomen.



Ponto op een softband




Ponto op een hoofdband

De soundprocessor in- en uitschakelen



Inschakelen

Sluit de batterijlade met de batterij erin.

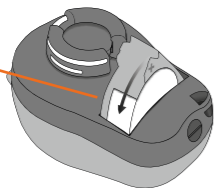

Uitschakelen

Open de batterijlade volledig. Verwijder de batterij voordat u de soundprocessor in zijn doosje doet om te voorkomen dat de batterij onnodig leeg raakt.

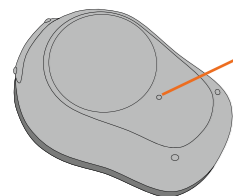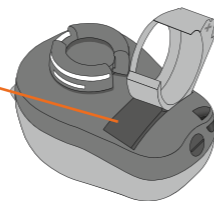


Optionele led

Twee keer lang groen knipperen geeft aan dat de soundprocessor is ingeschakeld.

Vervangen van de batterij

Ponto 5 SuperPower heeft een 675P-batterij (blauwe verpakking) en Ponto 5 Mini heeft een 312-batterij (bruine verpakking). Gebruik voor optimale prestaties een hoogwaardige zink-luchtbatterij.

1. Openen

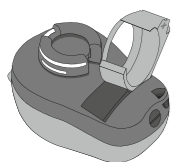

Open de batterijlade volledig. Verwijder de batterij.


2. Sticker verwijderen



Verwijder de sticker van de pluszijde van de nieuwe batterij.

Opmerking: Wacht twee minuten, zodat de batterij lucht kan opnemen voor een optimale werking.


3. Plaatsen

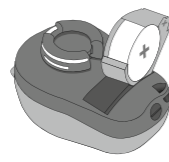


Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg dat de pluszijde omhoog is gericht.

Opmerking: Als de batterij onjuist wordt geplaatst, kan de batterijlade niet dicht. Bij gebruik van kracht kan het batterijvak beschadigen.

4. Sluiten

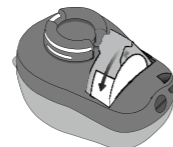

Sluit de batterijlade. De soundprocessor speelt een melodietje af.

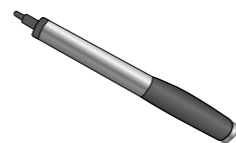

MultiTool

Opmerking: Voor het verwisselen van de batterij kan de MultiTool worden gebruikt. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en plaatsen van batterijen.

Volumeregelaar

Ponto 5 SuperPower

Het volume kan worden geregeld met de dubbele druktoets (zie pagina 7). Druk kort op de toets om het volume aan te passen. Wanneer de Ponto op uw hoofd zit, zet u het volume harder met de plus-toets en zachter met de min-toets. U kunt het geluid ook aanpassen in de Oticon Companion-app.

Ponto 5 Mini

Het volume kan via uw telefoon worden aangepast in de Oticon Companion-app.



Oticon Companion-app




Scan de QR-code om de app te downloaden.




De soundprocessor koppelen met uw iPhone

1. Instellingen

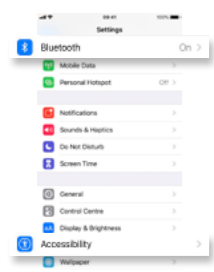


Open uw iPhone en ga naar “Instellingen”. Zorg dat Bluetooth® is ingeschakeld. Kies vervolgens “Toegankelijkheid”.

2. Toegankelijkheid

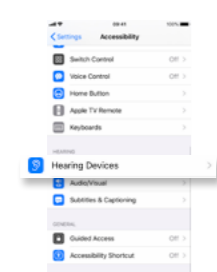


Kies “Hoortoestellen” in het scherm “Toegankelijkheid”.

3. Inschakelen

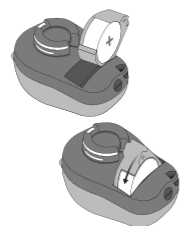


Open en sluit de batterijlade van de soundprocessor. De soundprocessor blijft drie minuten in de koppelingsmodus.

4. Hoortoestellen

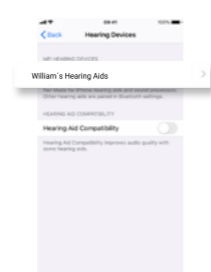

Controleer of uw iPhone uw soundprocessor heeft gedetecteerd.


5. Uw hoortoestel

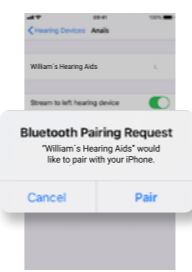

Zodra de soundprocessor is gedetecteerd, kunt u deze koppelen met uw iPhone.


Uw Android-telefoon koppelen met de ConnectClip

1. Instellingen

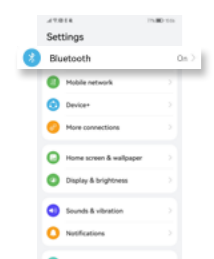


Open uw telefoon en ga naar “Instellingen”. Zorg dat Bluetooth® is ingeschakeld. Kies vervolgens “Bluetooth”.

2. Schakel ConnectClip in

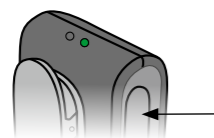

Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de stroomindicator CONTINU GROEN brandt.


3. Koppelen

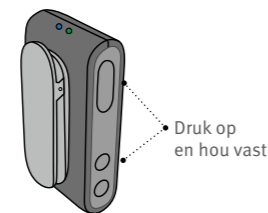

Houd de multitoets en volumeknop tegelijkertijd ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de statusindicator BLAUW KNIPPERT.

Opmerking: De ConnectClip blijft ongeveer 3 minuten in de koppelingsmodus. minutes.

4. Koppelen inschakelen

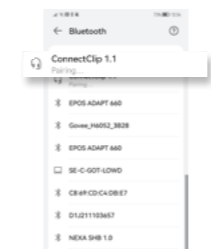

Zoek naar en koppel met ConnectClip.

Voer de pincode in: Als uw telefoon om een pincode vraagt, voer dan 0000 in (vier nullen).

5. Verbonden toestel



Wanneer het koppelen met uw mobiele telefoon is voltooid, brandt de statusindicator BLAUW.

Hoor van andere Ponto-gebruikers

Wilt u een andere Ponto-gebruiker spreken over diens ervaring en hoe het is om een Ponto-soundprocessor te hebben? Neem contact met ons op door op de onderstaande link te klikken of scan de QR-code, dan brengen wij u in contact met een Ponto-ambassadeur.
www.oticonmedical.com/nl/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/connect-with-others



Ponto-gebruikersdelen graag hun positieve ervaring met u. Bekijk de testimonials van gebruikers met een Ponto-soundprocessor door op de onderstaande link te klikken of de QR-code te scannen.
www.oticonmedical.com/nl/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/bahs-users-tell-their-story



U kunt ook contact met ons opnemen en ons volgen via Facebook:
www.facebook.com/OticonMedicalNL

Voor meer informatie over het Ponto™-systeem en welke voordelen het heeft voor uw gehoor en dagelijkse leven, gaat u naar:
www.oticonmedical.com/nl

Wij horen graag van u!

Belangrijke dingen om rekening mee te houden

- Soundprocessors, batterijen, onderdelen en accessoires moeten buiten het bereik worden gehouden van kinderen en andere personen die deze voorwerpen zouden kunnen inslikken of zich er op andere wijze mee zouden kunnen verwonden.
- De soundprocessor is niet waterdicht. Koppel het apparaat altijd los voordat u gaat douchen, baden of zwemmen. Mocht hij nat worden, open dan de batterijlade, verwijder de batterij en laat hem drogen.
- Stel de soundprocessor niet bloot aan extreme hitte.

Opmerking: Gebruik altijd de kindveilige batterijlade voor kinderen jonger dan 36 maanden. Als iemand per ongeluk een batterij inslikt, ga dan onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde instantie voor spoedeisende hulp.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Ponto-soundprocessor voor meer informatie en uitgebreide instructies.



Een van de meest positieve dingen van het in gang zetten van dit proces om een BAHS te krijgen, was dat ik het kon uitproberen op een softband. Net als bij het kopen van nieuwe schoenen. Als ze niet fijn zitten, breng je ze gewoon terug en is er niets aan de hand.”

Jamina, voormalig gebruiker van hoortoestellen, gebruikt momenteel een Oticon Medical BAHS

Because sound matters


Oticon Medical is een wereldwijde onderneming op het gebied van implanteerbare hooroplossingen, die zich er volledig op toelegt om mensen in elke levensfase de kracht van geluid te laten ervaren. Al meer dan een decennium maken we botverankerde hoorsystemen toegankelijker door de behandeling te vereenvoudigen voor artsen, audiologen en patiënten.

Wij zijn van mening dat patiënten en hoorzorgprofessionals op elk moment tijdens de reis van de patiënt de best mogelijke oplossing moeten kunnen kiezen. Wij noemen het “keuzevrijheid” en dit is altijd van het grootste belang geweest voor Oticon Medical. Daarom zijn onze oplossingen zo ontworpen dat ze waar mogelijk compatibel zijn. Een implantaat van Oticon Medical is een bewijs van onze onwrikbare levenslange ondersteuning.

We werken samen om ervoor te zorgen dat wij elke oplossing ontwerpen met de gebruikersbehoeften als uitgangspunt. Wij zetten ons voortdurend in om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan te bieden die de levenskwaliteit verbetert en mensen helpt ten volle te leven – nu en in de toekomst.

Omdat we weten hoe belangrijk geluid voor u is.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00