

Système auditif à ancrage osseux

Découvrez l'aide auditive Ponto

Un essai sur un bandeau souple ou un serre-tête



Because
sound matters



oticon
MEDICAL

Essayez avant de vous décider

En participant à cet essai, vous aurez l'occasion de tester un système auditif à ancrage osseux (BAHS) avec un bandeau souple ou un serre-tête. Le port de l'aide auditive Ponto dans différentes situations quotidiennes vous permettra de vous faire une idée de la façon dont un implant auditif pourrait améliorer votre audition. Il convient de noter qu'après l'implantation, la plupart des utilisateurs reportent une nette amélioration en termes de son.

Cette brochure contient deux parties dont le détails se trouve ci-dessous :

Journal d'essai (Partie 1)

Pour vous aider à prendre une décision plus éclairée, nous vous incitons à compléter le journal d'essai inclus à cette brochure. Il est donc recommandé de porter votre Ponto dans des situations quotidiennes telles que :

- À la maison (conversation dans un environnement calme)
- En regardant la télévision
- En société, avec des amis ou de la famille (conversation dans un environnement bruyant)
- À l'extérieur
- Lors d'appels téléphoniques

Guide produit (Partie 2)

Dans cette section, vous trouverez des informations complémentaires sur le fonctionnement de votre aide auditive Ponto afin que votre période d'essai se déroule au mieux.

Pour obtenir des informations complètes et des instructions détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec l'aide auditive Ponto.



Si vous préférez, vous pouvez utiliser l'application **Ponto Care** sur votre iPhone® pour trouver des réponses à vos questions.



Scannez le code QR pour télécharger l'application



Situation : **À la maison (conversation dans un environnement calme)**

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto

Situation : **En regardant la télévision**

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto



Situation : **En société, avec des amis ou de la famille**
(conversation dans un environnement bruyant)

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto

Situation : **À l'extérieur**

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto



Situation : **Lors d'appels téléphoniques. Si vous avez appairé votre aide auditive avec votre téléphone (voir page 10), utilisez-la pour passer ou recevoir un appel téléphonique.**

Remarque : Cela ne fonctionne que pour les iPhone. Pour les téléphones Android™, un ConnectClip est nécessaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre audioprothésiste dans votre centre d'audioprothèses. information, please consult with your hearing care professional at your clinic.

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto

Veuillez préciser votre situation (par exemple, au travail, à l'école ou pendant que vous écoutez de la musique) :
.....

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto



Veillez préciser votre situation (par exemple, au travail, à l'école ou pendant que vous écoutez de la musique) :

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto

Veillez préciser votre situation (par exemple, au travail, à l'école ou pendant que vous écoutez de la musique) :

Date/heure :

Expérience avec Ponto



Expérience sans Ponto



Vue d'ensemble de l'aide auditive



Double bouton-poussoir (uniquement sur le Ponto 5 SuperPower)

LED (diode électroluminescente)

Entrées pour microphones



Remarque : Le cordon de sécurité est conçu pour sécuriser votre aide auditive lors d'activités physiques et dans des situations où elle pourrait tomber. Vous pouvez fixer le cordon de sécurité à l'aide auditive et le clip à vos vêtements.

Tiroir-pile

Fixation pour le cordon de sécurité



Positionnement de l'aide auditive

Pour des performances optimales, positionnez l'aide auditive verticalement, de sorte que les entrées du microphone se trouvent en bas et soient alignées sur le plan horizontal.

Évitez tout contact avec l'aide auditive (par exemple, l'oreille, la peau ou un chapeau) afin d'éviter le Larsen (sifflement).



Ponto sur un bandeau souple




Ponto sur un serre-tête

Allumer et éteindre l'aide auditive



Démarrer

Fermez le tiroir-pile lorsque la pile se trouve à l'intérieur.

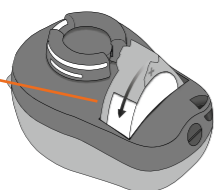

Eteindre

Ouvrez complètement le tiroir-pile. Avant de placer l'aide auditive dans son étui, retirez la pile pour éviter que l'appareil ne la consomme inutilement.

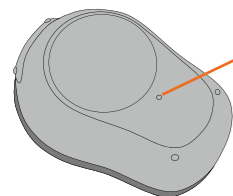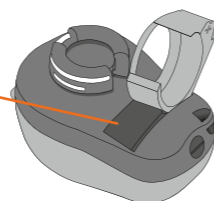


DEL en option

Deux longs clignotements verts indiquent que l'aide auditive est allumée.

Comment remplacer la pile ?

Le Ponto 5 SuperPower fonctionne avec une pile de type 675P (emballage bleu) et le Ponto 5 Mini fonctionne avec une pile de type 312 (emballage marron). Pour des performances optimales, utilisez une pile zinc-air de haute qualité.

1. Ouvrir

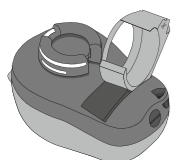

Ouvrez complètement le tiroir-pile. Retirez la pile.


2. Décoller



Retirez l'étiquette autocollante du côté + de la nouvelle pile.

Remarque : Patientez deux minutes de façon que la pile puisse s'oxygéner et fonctionner de manière optimale.


3. Insérer

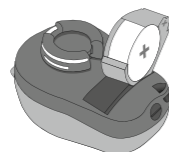


Insérez la nouvelle pile dans le tiroir-pile. Assurez-vous que le côté + est orienté vers le bas.

Remarque : Si la pile n'est pas insérée correctement, il n'est pas possible de fermer le tiroir-pile. Le recours à une force excessive risque d'endommager le compartiment de pile.

4. Fermer

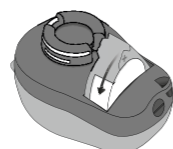

Fermez le tiroir-pile. L'aide auditive émettra une petite musique.

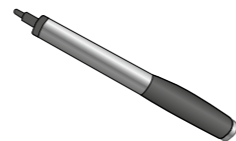

Outil multi-usage

Remarque : Il est possible d'utiliser un outil multi-usage pour changer la pile. Utilisez l'extrémité magnétique pour retirer et insérer les piles.

Contrôle du volume

Ponto 5 SuperPower

Le volume peut être réglé au moyen du double bouton-poussoir (voir page 7). Il suffit d'une brève pression pour régler le volume. Lorsque l'aide auditive est portée sur la tête, le bouton orienté vers l'avant augmente le volume, et le bouton orienté vers l'arrière diminue le volume. Vous pouvez également régler le son dans l'application « Oticon Companion ».

Ponto 5 Mini

Le volume peut être réglé sur votre téléphone dans l'application « Oticon Companion ».



Application Oticon Companion




Scannez le code QR pour télécharger l'application.




Appairage de l'aide auditive avec votre iPhone

1. Réglages

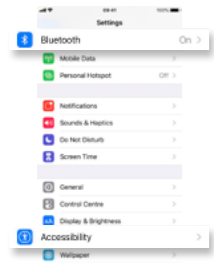


Ouvrez votre iPhone et rendez-vous dans « Réglages ». Assurez-vous que le Bluetooth® est activé. Choisissez ensuite « Accessibilité ».

2. Accessibilité

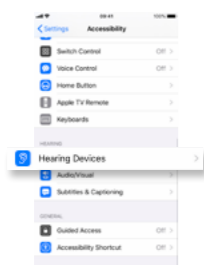


Sur l'écran « Accessibilité », choisissez « Aides auditives ».

3. Mise en marche

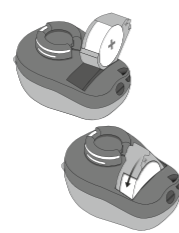


Ouvrez et fermez le tiroir-pile sur l'aide auditive. L'aide auditive reste en mode appairage pendant trois minutes.

4. Aides auditives

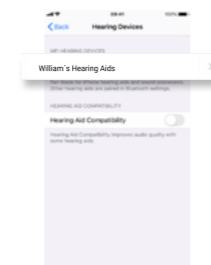

Vérifiez que votre iPhone a détecté votre aide auditive.


5. Votre aide auditive

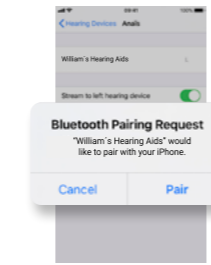

Une fois la détection effectuée, vous pouvez appairer l'aide auditive avec votre iPhone.


Appairage de votre téléphone Android avec le ConnectClip

1. Réglages

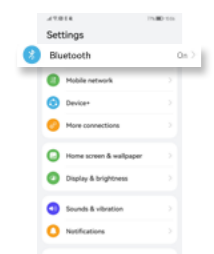


Ouvrez votre téléphone et rendez-vous dans « Réglages ». Assurez-vous que le Bluetooth® est activé. Choisissez ensuite « Bluetooth ».

2. Allumer le ConnectClip

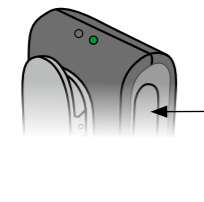

Appuyez sur le bouton multi-usage et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le témoin de charge reste allumé en VERT SANS CLIGNOTER.


3. Appairage

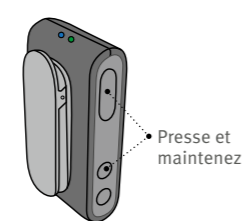

Appuyez sur le bouton multi-usage et le bouton d'augmentation du volume en même temps et maintenez-les enfoncés pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le témoin d'état CLIGNOTE EN BLEU.

Remarque : Le ConnectClip reste en mode appairage pendant environ 3 minutes.


4. Activation de l'appairage

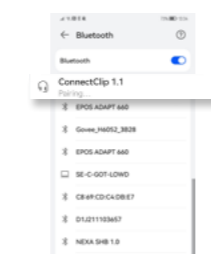

Recherchez et appairez le ConnectClip.

Saisissez le code pin : Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000 (quatre zéros).

5. Appareil connecté

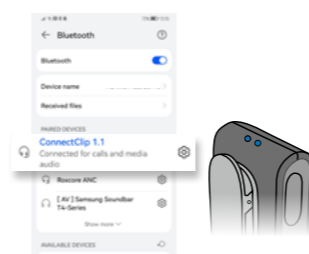

Lorsque l'appairage avec votre téléphone portable est terminé, le témoin d'état reste allumé en BLEU SANS CLIGNOTER.

Découvrez l'avis d'autres utilisateurs Ponto

Souhaitez-vous échanger avec un autre utilisateur au sujet de son expérience et de ses impressions concernant l'aide auditive Ponto ? Veuillez nous contacter en cliquant sur le lien ci-dessous, ou scannez le code QR et nous vous mettrons en contact avec un ambassadeur Ponto. www.oticonmedical.com/french/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/connect-with-others



Les utilisateurs Ponto d'Oticon Medical se feront un plaisir de partager leur expérience positive avec vous. Regardez les témoignages d'utilisateurs des aides auditives Ponto en cliquant sur le lien ci-dessous, ou en scannant le code QR.

www.oticonmedical.com/french/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/bahs-users-tell-their-story



Vous pouvez également nous contacter et suivre notre page Facebook : www.facebook.com/OticonMedical

Pour en savoir plus sur le système Ponto™ et sur les avantages qu'il peut apporter à votre audition et à votre vie quotidienne, rendez-vous sur : www.oticonmedical.com/fr

Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles !

Informations importantes

- Les aides auditives, leurs pièces et les piles doivent être conservées hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler ces éléments ou de se blesser.

Remarque : Utilisez toujours le tiroir-pile de sécurité pour les enfants de moins de 36 mois. En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, consultez immédiatement un médecin au service des urgences le plus proche.

- Cette aide auditive n'est pas étanche. Déconnectez-la toujours avant de prendre une douche ou un bain ou d'aller à la piscine. Si elle est mouillée accidentellement, ouvrez le logement de la pile, sortez la pile et laissez-la sécher.
- Évitez d'exposer l'aide auditive à une chaleur extrême.

Pour obtenir des informations complètes et des instructions détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec l'aide auditive Ponto.



“

L'un des aspects les plus intéressants du processus d'obtention du BAHS est que j'ai pu l'essayer sur un bandeau souple. C'est comme acheter une nouvelle paire de chaussures. Si vous ne les aimez pas, il suffit de les rendre et cela ne pose aucun problème. »

Jamina, ancienne utilisatrice d'aides auditives, aujourd'hui utilisatrice d'un BAHS d'Oticon Medical

Because sound matters

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs d'accéder à la puissance du son, à chaque étape de leur vie. Depuis plus de dix ans, nous rendons les systèmes auditifs à ancrage osseux plus accessibles en simplifiant le traitement pour les médecins, les audioprothésistes et les patients.

Nous pensons que les patients et les audioprothésistes doivent pouvoir choisir la meilleure solution possible à tout moment du parcours du client. C'est ce que nous appelons la « liberté de choix » et cela a toujours été primordial pour Oticon Medical. C'est la raison pour laquelle nos solutions sont conçues pour être aussi compatibles que possible. Par conséquent, un implant Oticon Medical est un véritable témoin de notre soutien inébranlable tout au long de la vie.

Nous travaillons en collaboration afin de garantir que chaque produit créé intègre les besoins et les attentes de nos utilisateurs. Nous avons la passion de fournir des solutions et un soutien innovants qui améliorent la qualité de vie et aident les gens à vivre pleinement leur vie, aujourd'hui comme à l'avenir.

Parce que nous considérons la valeur que représente chaque son.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00