

Prótesis auditiva osteointegrada

Guía de cuidados del procesador de sonido Ponto



oticon
MEDICAL


Índice

Tras la intervención quirúrgica	4
El periodo de cicatrización.....	5
Guía de limpieza	6
Vivir con su sistema Ponto™	8
Toma de imágenes por resonancia magnética (IRM)	10
Viajar/seguridad en aeropuertos	11
Cuidado y mantenimiento.....	12
Ponto y las soluciones osteointegradas en las redes sociales	16

Estimado nuevo usuario de Ponto:

Ha recibido un implante Ponto. El pilar es una conexión reemplazable y su proveedor médico pueden cambiarlo en caso necesario.


Este folleto le facilitará consejos útiles sobre cómo mantener sana la zona del pilar y cómo actuar en diferentes situaciones diarias. A medida que se acostumbra a su sistema Ponto™, probablemente desarrollará sus propias rutinas de limpieza diaria alrededor de la zona del pilar.

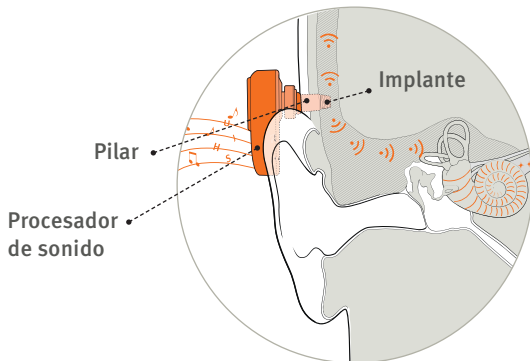

Tras la intervención quirúrgica

Cuando instala el implante, el cirujano colocará un tapón de cicatrización sobre el pilar y el implante. El cirujano retirará el tapón de cicatrización, junto con el apósito y los puntos de sutura, cuando lo considere apropiado, aproximadamente entre una y dos semanas tras la cirugía. Si su piel no se ha secado completamente, el apósito y el tapón de cicatrización se dejarán en el sitio unos días más. Si el tapón de cicatrización se cayese accidentalmente, vuelva a colocarlo sobre el pilar.

En las primeras semanas, tras la colocación del implante, deberá mantener el tapón de cicatrización y el apósito secos.

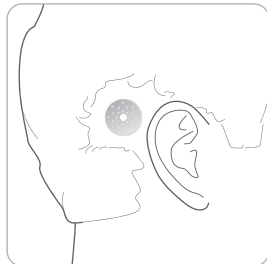

El periodo de cicatrización

Cuando se tiene un implante osteointegrado, es importante mantener una higiene adecuada para evitar problemas de irritación de la piel e infecciones. Es importante seguir una rutina de limpieza diaria del pilar y de la zona de alrededor para evitar la acumulación de suciedad.

Una vez retirado el tapón de cicatrización, puede que su piel aún esté muy sensible y que deba tratarla con cuidado. A la hora de limpiar el pilar y la zona alrededor del pilar, lávese siempre primero las manos. Después, limpie toda la zona que rodea el pilar utilizando una toallita húmeda sin alcohol.

Tendrá que esperar un poco tras la cirugía antes de poder lavarse el pelo. Cuando su piel haya cicatrizado y su proveedor médico le dé permiso, se recomienda usar un champú suave durante las primeras semanas.



No es raro notar entumecimiento en torno al pilar en el periodo tras la intervención quirúrgica. En la mayoría de los casos, mejorará con el tiempo.

Guía de limpieza

Cuando la zona alrededor del implante haya cicatrizado completamente, el pilar debe revisarse periódicamente y debe continuarse la rutina de limpieza diaria para evitar la acumulación de suciedad alrededor del pilar. Lave la zona del pilar con agua caliente y jabón neutro. Al lavarse el pelo, los residuos en el pilar se ablandan y, así, son más fáciles de eliminar.

Tras haber limpiado la zona, utilice, por ejemplo, un bastoncillo de algodón para limpiar con suavidad alrededor y dentro del pilar. Puede ser útil usar un espejo. Si tiene dos implantes (implantación bilateral), debería, por motivos de higiene, usar bastoncillos de algodón distintos para limpiar cada pilar. Nunca se rasque la piel que rodea el pilar con un objeto afilado.

Si nota dolor, problemas en la piel (por ejemplo, dolor, enrojecimiento, irritación o inflamación), o si el pilar o el implante se suelta, póngase en contacto con su clínica para obtener asesoramiento y tratamiento potencial.

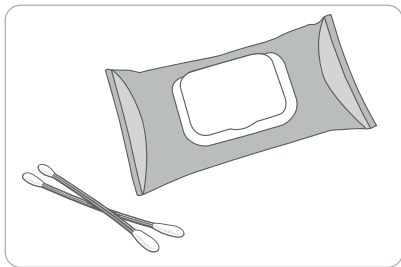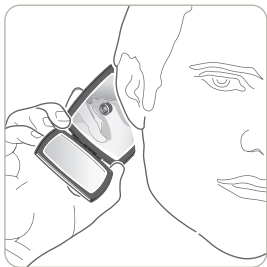

Vivir con su sistema Ponto™

Cuando tiene un implante osteointegrado, es importante mantener una buena rutina de limpieza diaria del pilar y de la zona de alrededor. Una limpieza insuficiente puede dar lugar a infecciones que podrían provocar la pérdida del implante, incluso pasados varios años. Inspeccione la piel que rodea el pilar todos los días. Cuando revise el pilar, asegúrese de que no hay pelos atrapados en él.


Nunca coloque un transmisor óseo tradicional o un procesador de sonido en una cinta Softband, diadema o cinta de prueba encima de un pilar, implante o implante secundario recién instalado, ya que esto podría tener efectos negativos en la forma de integrarse del implante en el hueso del cráneo.

Cuando no utilice el procesador de sonido, puede usarse un cobertor del pilar para evitar que la suciedad entre en el pilar y también para ocultarlo.

Cuando no lleve el procesador de sonido, guárdelo siempre en su caja. De esta forma, estará protegido del polvo y la suciedad. Si está usando una piel de personalización sobre el procesador de sonido, asegúrese de retirarla antes de colocar el procesador de sonido en su caja.

Recuerde quitarse el procesador de sonido antes de ducharse o bañarse/nadar, ya que no es impermeable.

Un buen hábito es pasarse los dedos por el cabello para comprobar si está ahí antes de bañarse o ducharse.

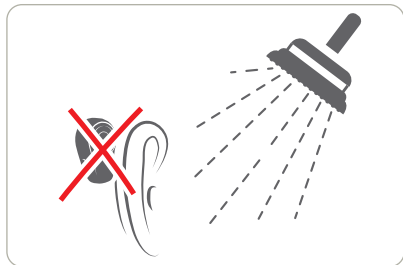

Toma de imágenes por resonancia magnética (IRM)

Si necesita someterse a un escáner IRM, asegúrese de informar a su médico que tiene un sistema de audición osteointegrado, y en la consulta médica, presente la tarjeta del implante Ponto que recibió en el momento de la cirugía. Para niños y personas con discapacidad mental, esto es responsabilidad del cuidador.

Si necesita una copia de la tarjeta del implante Ponto, la encontrará en varios idiomas en: www.oticonmedical.com bajo "Descargas", desplácese a "Formularios y tarjetas de seguridad".

Viajar/seguridad en aeropuertos

Cuando viaje, recuerde llevar la tarjeta de implante Ponto. En caso de necesitar tratamiento médico, esta información explicará por qué deben dejarse en su sitio el implante y el pilar. Esta información también puede presentarse al pasar por dispositivos de control de seguridad, en aeropuertos o edificios, por ejemplo.

En aeropuertos, siga las instrucciones de los oficiales de seguridad en su punto de control. Le dirán si puede dejarse puesto el procesador de sonido o no. Cuando viaje en avión, active el modo de vuelo en el procesador de sonido para desactivar el Bluetooth® durante el despegue y el aterrizaje tal como indica el personal de vuelo. Consulte las instrucciones de uso del procesador de sonido para habilitar el modo vuelo.

Cuidado y mantenimiento

Calor

- Los implantes y pilares están hechos de titanio y exponer su implante y su pilar a altas temperaturas (por ejemplo, saunas, aire caliente de un secador), puede generar calor en la zona del implante/pilar. Si nota esto, enfríe la zona y evite la fuente de calor.
- Evite la exposición a altas temperaturas en el periodo inmediato tras la cirugía, hasta que la zona haya cicatrizado completamente.
- Si se utiliza un secador de pelo con aire caliente, evite dirigirlo hacia el pilar durante demasiado tiempo ya que esto puede provocar una acumulación de calor.
- El procesador de sonido nunca debe exponerse a calor extremo, por ejemplo, dejarse dentro de un coche aparcado al sol, y no debe secarse en un microondas u otros hornos.

Humedad

- Si visita o vive en una zona con elevada humedad, coloque el procesador de sonido en el tubo de secado todas las noches. Si necesita un tubo de secado, consulte con su médico.

- Durante periodos de alta actividad o si se suda mucho, es importante mantener la zona alrededor del pilar limpia y seca.

Ir a la peluquería

- Asegúrese de tapar siempre su pilar durante los tratamientos capilares y cuando utilice gel para el cabello o laca. Puede emplear el cobertor del pilar que se le entregó con el procesador de sonido.

Productos químicos

- Quítese siempre el procesador de sonido antes de aplicar productos químicos como laca para el pelo, perfume, loción para después del afeitado, loción para el sol o repelente de insectos y permita tiempo para que se sequen antes de volver a ponerlo.

Actividades

- Es importante minimizar los traumatismos en la zona del implante y en las partes implantadas. Tome precauciones para proteger el pilar cuando participe en actividades que puedan exponerle a traumatismos directos. Debería considerar usar casco si participa en deportes de contacto (debería evitar algunos deportes de contacto).

- Nadar no debería ser un problema siempre que la piel haya cicatrizado y la zona del pilar se mantenga limpia.
- Para evitar que el procesador de sonido se caiga durante las actividades físicas, o en otras situaciones en las que el dispositivo podría caerse, recomendamos que use la cuerda de seguridad diseñada para ayudarlo a evitar que el procesador de sonido se caiga. También le recomendamos el uso de la cuerda de seguridad hasta que se haya acostumbrado a llevar el dispositivo.
- Su procesador de sonido es resistente al polvo y está protegido contra la entrada de agua, lo que significa que está diseñado para ser utilizado en las situaciones cotidianas. Aunque el procesador de sonido ha logrado una clasificación IP57 de protección contra la entrada de agua, se considera resistente al agua, no impermeable. Desconecte siempre el procesador de sonido antes de ducharse o bañarse. Si el procesador de sonido se moja por accidente, abra la tapa del portapilas, saque las pilas y deje que el procesador de sonido se seque.

Precaución.

El sistema Ponto tiene piezas pequeñas, que si se sueltan y se tragan, pueden presentar riesgo de atragantamiento o daños al tracto digestivo. Mantenga las piezas y accesorios pequeños lejos del alcance de los niños.

Ponto y las soluciones osteointegradas en las redes sociales

Para saber más sobre las características y beneficios del sistema Ponto, visite:
www.oticonmedical.com

Puede contactar con nosotros en oticonmedical.com y seguirnos en Facebook en
www.facebook.com/oticonmedical

En Facebook, contamos con varios grupos de apoyo y foros donde puede conocer a otros usuarios de soluciones osteointegradas. Busque **“prótesis auditiva osteointegrada”** o **“BAHA”**.

También estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube.



Para leer experiencias de los usuarios con Ponto, visite:
<https://www.oticonmedical.com/hearing-and-hearing-loss/meet-other-users/bahs-users-tell-their-story>



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

oticon | Because
MEDICAL | sound matters



www.oticonmedical.com